

Инструкция по эксплуатации

SMARTmatic S53 - 1.011.6810



**Отдел продаж:**

KaVo Dental GmbH  
Bismarckring 39  
88400 Biberach, Германия  
Тел. +49 7351 56-0  
Факс +49 7351 56-1488

**Изготовитель:**

Kaltenbach & Voigt GmbH  
Bismarckring 39  
88400 Biberach, Германия  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

## Оглавление

<b>1</b>	<b>Информация для пользователей</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Безопасность</b>	<b>6</b>
2.1	Опасность инфицирования	6
2.2	Техническое состояние	6
2.3	Принадлежности и сочетание с другими приборами	7
2.4	Квалификация персонала	7
2.5	Техническое обслуживание и ремонт	7
<b>3</b>	<b>Описание продукта</b>	<b>9</b>
3.1	Целевое назначение — использование по назначению	10
3.2	Технические характеристики	10
3.3	Условия транспортировки и хранения	10
<b>4</b>	<b>Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Эксплуатация</b>	<b>13</b>
5.1	Установка изделия	13
5.2	Снятие изделия	13
5.3	Использование инструментов	13
5.4	Удаление инструментов	15
<b>6</b>	<b>Проверка и устранение неисправностей</b>	<b>16</b>
6.1	Проверка неисправностей	16
6.2	Устранение неисправностей	16
6.2.1	Замена уплотнительных колец на муфте сцепления микромотора	16
<b>7</b>	<b>Этапы обработки согласно ISO 17664</b>	<b>17</b>
7.1	Подготовка на месте применения	17
7.2	Очистка	17
7.2.1	Ручная наружная очистка	17
7.2.2	Наружная очистка машины	17
7.2.3	Ручная внутренняя очистка	18
7.2.4	Внутренняя очистка машины	18
7.3	Дезинфекция	18
7.3.1	Ручная наружная дезинфекция	19
7.3.2	Ручная внутренняя дезинфекция	19
7.3.3	Машинная наружная и внутренняя дезинфекция	19
7.4	Сушка	20
7.5	Средства и системы для ухода — техническое обслуживание	20
7.5.1	Уход с помощью KaVo Spray	20
7.5.2	Уход при помощи распылителя KaVo SPRAYrotor	21
7.5.3	Уход при помощи KaVo QUATTROcare	21
7.5.4	Уход с помощью KaVo QUATTROcare PLUS	22
7.6	Упаковка	23
7.7	Стерилизация	23
7.8	Хранение	24
<b>8</b>	<b>Вспомогательные средства</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>Гарантийные обязательства</b>	<b>26</b>

## 1 Информация для пользователей

Многоуважаемый пользователь!

KaVo предлагает вам свое новое высококачественное изделие. Для обеспечения бесперебойной, экономной и безопасной работы следует соблюдать приведенные ниже указания.

© KaVo Dental GmbH



### Ремонтная служба KaVo

В случае, если необходим ремонт, обратитесь к своему дилеру или непосредственно в ремонтную службу KaVo:

+49 (0) 7351 56-1900

service.reparatur@kavo.com

### Техническое обслуживание KaVo

С техническими вопросами или претензиями обращайтесь в службу технического обслуживания KaVo:

+49 (0) 7351 56-1000

service.instrumente@kavo.com

### Целевая группа

Данный документ предназначен для врача-стоматолога и его ассистента. Глава «Ввод в эксплуатацию» предназначена также для технических специалистов.

### Общие знаки и символы

	См. главу «Техника безопасности/предупреждающий знак»
	Важная информация для пользователей и технических специалистов
	Действия, которые нужно выполнить
	Маркировка CE (Communauté Européenne). Изделие с этой маркировкой отвечает требованиям соответствующей директивы ЕС.
	Стерилизация паром 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
	Термодезинфекция

### Степени опасности

Для предотвращения нанесения вреда людям и имуществу все приведенные в данном документе предупреждающие указания и указания по технике безопасности должны неукоснительно соблюдаться. Предупреждающие указания обозначены следующим образом:



**⚠ ОПАСНОСТЬ!**

Ситуации, которые – если их не избежать – ведут к смерти или тяжелым травмам.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Ситуации, которые – если их не избежать – могут привести к смерти или тяжелым травмам.



**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Ситуации, которые – если их не избежать – могут привести к травмам средней или легкой тяжести.

**УВЕДОМЛЕНИЕ!**

Ситуации, которые – если их не избежать – могут привести к материальному ущербу.

## 2 Безопасность

Настоящая инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью продукта. Перед использованием продукта она должна быть внимательно прочитана и доступна в любое время.

Продукт разрешается использовать только по назначению, использование не по назначению недопустимо.

### 2.1 Опасность инфицирования

Инфицированные медицинские изделия могут инфицировать пациентов, пользователей или третьих лиц.

- ▶ Примите соответствующие меры по защите людей.
- ▶ Соблюдайте инструкцию по эксплуатации
- ▶ Перед первым вводом в эксплуатацию и после каждого использования выполнять соответствующую обработку или, при необходимости, стерилизацию продукта и принадлежностей.
- ▶ Стерилизацию выполнить сразу же после очистки. Vorgehensweise wurde vom Hersteller validiert.
- ▶ Bei abweichender Vorgehensweise Wirksamkeit der Reinigung und Sterilisation sicherstellen.
- ▶ Перед утилизацией произведите соответствующую подготовку изделия и принадлежностей или (при необходимости стерилизацию).
- ▶ Bei Weichteilverletzungen Behandlung in der Mundhöhle mit druckluftbetriebenen Instrument nicht fortsetzen.
- ▶ При проверке, установке и снятии инструмента используйте перчатки или напальчники.

### 2.2 Техническое состояние

Поврежденное изделие или поврежденные компоненты могут поранить пациента, пользователя или окружающих.

- ▶ Produkt und Komponenten nur betreiben, wenn sie äußerlich unbeschädigt sind.
- ▶ Перед каждым использованием проверяйте изделие и принадлежности на готовность к эксплуатации и надлежащее состояние.
- ▶ При наличии изломов и видимых повреждений поверхности проверка деталей должна осуществляться службой сервиса.
- ▶ При возникновении следующего прекратите работу и вызовите специалиста по ремонту:
  - Неисправности
  - Повреждения
  - Нерегулярные шумы при работе
  - Слишком сильная вибрация
  - Перегрев
  - Непрочная фиксация наконечника в инструменте

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten und um Sachschaden zu vermeiden, Folgendes beachten:

- ▶ Medizinprodukt regelmäßig mit Pflegemitteln und Pflegesystemen behandeln, wie in Gebrauchsanweisung beschrieben.

- ▶ Перед длительными перерывами в работе в соответствии с руководством необходимо выполнить операции по уходу изделия, очистить его, после чего хранить в сухих условиях.

Большой вращающий момент у микромотора может послужить причиной тяжелых ожогов.

- ▶ Регулярно проводите техническое обслуживание микромоторов.
- ▶ Не используйте поврежденные микромоторы.
- ▶ Не допускайте использования микромоторов не по назначению.

## 2.3 Принадлежности и сочетание с другими приборами

Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder nicht zugelassene Veränderungen am Produkt können zu Verletzungen führen.

- ▶ Используйте только разрешенные производителем принадлежности, которые совместимы с изделием
- ▶ Используйте принадлежности, имеющие стандартные разъемы.
- ▶ Вносите в прибор только те изменения, которые разрешены производителем.

Отсутствие устройства управления для изменения скорости и направления вращения может привести к травмированию.

- ▶ Устройство управления для изменения скорости и направления вращения должно быть в наличии.
- ▶ Допускается комбинация только с допущенной фирмой KaVo стоматологической установкой.
- ▶ Соблюдайте инструкцию по эксплуатации стоматологической установки.

## 2.4 Квалификация персонала

Использование изделия пользователем без специального медицинского образования может привести к травмированию пациента, пользователя или третьих лиц.

- ▶ Убедитесь в том, что пользователь прочитал и понял инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Используйте изделие, только если пользователь имеет специальное медицинское образование.
- ▶ Соблюдайте предписания!

Der Einsatz des Produkts kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Verbrennungen oder Verletzungen führen.

- ▶ Не касаться мягких тканей головкой или крышкой инструмента!
- ▶ После лечения уложите медицинское изделие без инструмента должным образом в подставку.

## 2.5 Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт и технические проверки должны выполняться только квалифицированными специалистами. На это уполномочен следующий персонал:

- Технические специалисты представительств KaVo, прошедшие специальное обучение

- Технические специалисты дистрибьюторов фирмы KaVo, прошедшие специальное обучение

Bei allen Wartungsarbeiten Folgendes beachten:

- ▶ Техническое обслуживание и проверки должны выполняться в соответствии с предписаниями организации, эксплуатирующей медицинские изделия.
- ▶ По истечении гарантии ежегодно поручайте специалистам проверку системы фиксации инструментов.
- ▶ Компания KaVo рекомендует составить график технического обслуживания и согласно нему передавать изделие специализированному предприятию для очистки, проверки функционирования и выполнения других работ, необходимых для поддержания изделия в исправном состоянии. При составлении графика необходимо учитывать, насколько часто используется изделие.

### 3 Описание продукта



SMARTmatic S53 (материал № 1.011.6810)

### 3.1 Целевое назначение — использование по назначению

#### Целевое назначение:

Данное изделие

- предназначено только для использования в стоматологии. Любое использование не по назначению или изменение изделия не допускается и может представлять опасность. Медицинское изделие предназначено для следующих целей: эндодонтия, а также полировка зубов в качестве вспомогательной меры при лечении пародонтопатии.
- является медицинским изделием согласно действующему национальному законодательству.

#### Использование по назначению:

Согласно этим положениям данное медицинское изделие разрешается использовать только опытным пользователям и только в описанных целях. При этом необходимо соблюдать:

- действующие правила охраны труда;
- действующие правила предупреждения несчастных случаев;
- данную инструкцию по эксплуатации

Согласно этим положениям пользователь обязан:

- использовать только исправное оборудование;
- использовать оборудование строго по назначению;
- следить за своей безопасностью, а также за безопасностью пациентов и третьих лиц;
- не допускать заражения при пользовании изделием.

### 3.2 Технические характеристики

Число оборотов привода	макс. 20 000 мин <sup>-1</sup>
Передаточное отношение	8:1
Расход охлаждающего воздуха	5,5–9,5 норм. л/мин.

Зажим выполняется при помощи кнопки.

Можно применять инструменты для корневых каналов.

Число оборотов привода преобразуется в осциллирующее перемещение величиной около 70°.

Угловой наконечник можно устанавливать на все двигатели INTRAmatic (LUX) и двигатели с присоединением согласно ISO 3964 / DIN 13940.





### 3.3 Условия транспортировки и хранения

#### УВЕДОМЛЕНИЕ!

**Ввод в эксплуатацию после хранения в холодном помещении.**

Сбой функции.

- ▶ Сильно охлажденные изделия перед вводом в эксплуатацию необходимо довести до температуры от 20 °C до 25 °C (от 68 °F до 77 °F).

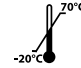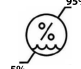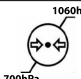	Температура: от -20 °С до +70 °С (от -4 °F до +158 °F)
	Относительная влажность воздуха: от 5 до 95 %, без образования конденсата
	Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа (от 10 psi до 15 psi)
	Защищать от воздействия влаги

## 4 Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации



### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность из-за нестерильных изделий.**

Опасность заражения врача и пациента.

- ▶ Перед первым вводом в эксплуатацию и после каждого использования выполнять подготовку и изделия и принадлежностей.



### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Утилизируйте изделие надлежащим образом.**

Опасность инфицирования.

- ▶ Перед утилизацией обработайте изделие и принадлежности.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ!**

**Повреждения вследствие загрязненного и влажного охлаждающего воздуха.**

Загрязненный и влажный охлаждающий воздух может стать причиной неисправности.

- ▶ Необходимо обеспечить подачу сухого, очищенного и не содержащего загрязнений охлаждающего воздуха в соответствии с требованиями EN ISO 7494-2.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ!**

**Повреждение угловой насадки из-за распыления воздуха и воды.**

Материальный ущерб

- ▶ Перед вводом в эксплуатацию деактивировать спрей-воздух и спрей-воду на стоматологической установке!

## 5 Эксплуатация

### 5.1 Установка изделия



#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

**Отсоединение изделия во время лечения.**

Травмы или материальный ущерб

Неправильно зафиксированное медицинское изделие может отсоединиться от соединительного зажима двигателя и упасть.

- ▶ Перед каждым применением слегка потянуть за медицинское изделие для проверки надежности его фиксации на соединительном зажиме двигателя.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ!

**Снятие и установка угловой насадки при работающем электроприводе.**

Повреждение патрона.

- ▶ Запрещается устанавливать и снимать угловую насадку при работающем электроприводе.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ!

**Приведение в действие педального выключателя во время установки и удаления медицинского изделия.**

Повреждение изделия.

- ▶ Не надевать и не снимать медицинское изделие при нажатом педальном выключателе.
- ▶ Слегка смажьте уплотнительные кольца на переходнике микромотора средством KaVo Spray.
- ▶ Насадите изделие на переходник микромотора и зафиксируйте со щелчком.
- ▶ Потяните изделие, чтобы проверить надежность фиксации на переходнике.



### 5.2 Снятие изделия

- ▶ Отцепить изделие от соединительного зажима двигателя путем легкого поворота и снять в направлении оси.

### 5.3 Использование инструментов



#### Указание

Используйте только инструменты для корневого канала с хвостовиками, отвечающими требованиям ISO 1797-1 тип 1 и ISO 3630-1:

- диаметр хвостовика: 2,334–2,350 мм
- Длина фиксируемой части хвостовика: не менее 12 мм

**Указание**

Использовать только полировальные фрезы, соответствующие ISO 1797 (1, 2 и 3) тип 1, выполненные из стали, твердого сплава или пластика и отвечающие следующим критериям:

- диаметр хвостовика: 2,334–2,350 мм
- Длина фиксируемой части хвостовика: не менее 12 мм

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****Использование не допущенных инструментов.**

Опасность травмирования.

- ▶ Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и используйте инструменты по назначению.
- ▶ Использовать только инструменты, не отличающиеся от указанных данных.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****Опасность из-за вращающихся инструментов.**

Порезы.

- ▶ Не прикасайтесь к вращающемуся инструменту!
- ▶ После завершения обработки вытащите инструмент из изделия, чтобы предотвратить травмы и заражение при укладывании.

**⚠ ВНИМАНИЕ!****Использование инструментов с изношенными или поврежденными хвостовиками.**

Опасность травмирования, инструмент может выпасть в процессе лечения.

- ▶ Никогда не используйте инструменты с поврежденными или изношенными хвостовиками.

**⚠ ВНИМАНИЕ!****Опасность из-за неисправной зажимной системы.**

Инструмент может выпасть и стать причиной травмы.

- ▶ Потянув за инструмент, проверьте, в порядке ли зажимная система и фиксируется ли инструмент. При проверке, установке и извлечении следует использовать перчатки или напальчники, т. к. в противном случае возникает опасность травмирования и занесения инфекции.

**УВЕДОМЛЕНИЕ!****Проворачивание хвостовика инструмента в цанговом зажиме из-за слишком высокой скорости вращения инструмента или из-за внезапного зацепления инструмента.**

Материальный ущерб вследствие повреждения хвостовика и зажимной системы, сокращение срока службы инструмента и зажимной системы.

- ▶ Не превышайте скорость вращения инструмента, предписанную изготовителем.

**УВЕДОМЛЕНИЕ!****Использование инструментов с изношенными или поврежденными хвостовиками.**

Материальный ущерб вследствие повреждения зажимной системы: инструмент с трудом извлекается или вообще не извлекается из зажимной системы.

- ▶ Не используйте инструменты с поврежденными или изношенными хвостовиками.



- ▶ Легким вращательным движением ввести инструмент в сегмент привода головки и прижать до упора.
- ▶ Потянув, проверьте прочность крепления инструмента.


## 5.4 Удаление инструментов

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Опасность из-за вращающихся инструментов.**

Порезы, инфекция и ожоги.

- ▶ Не касайтесь вращающихся инструментов.
- ▶ Никогда не нажимайте кнопку при вращающемся инструменте.
- ▶ После завершения обработки извлеките инструмент из угловой насадки, чтобы предотвратить травмы и заражение при укладывании.

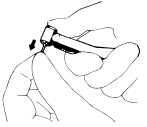

- ▶ После остановки инструмента с усилием нажмите на кнопку большим пальцем и одновременно выньте инструмент.

## 6 Проверка и устранение неисправностей

### 6.1 Проверка неисправностей

#### УВЕДОМЛЕНИЕ!

##### Отсутствие или повреждение уплотнения

Неисправности и материальный ущерб.

- ▶ Все уплотнительные кольца должны быть в наличии и в исправном состоянии.



#### ВНИМАНИЕ!

##### Нагрев изделия.

Сжигание или повреждение изделия из-за перегрева.

- ▶ Ни в коем случае не работать при нерегулярном нагревании изделия.
- ▶ Медицинское изделие перегревается на холостом ходу:  
Проверить расход охлаждающего воздуха.
- ▶ Медицинское изделие перегревается при нагрузке:  
выполните уход за изделием.
- ▶ При работе с перебоями/неровном вращении:  
выполните уход за изделием.
- ▶ Нет уплотнительного кольца на переходнике микромотора:  
замените уплотнительное кольцо.

### 6.2 Устранение неисправностей

#### 6.2.1 Замена уплотнительных колец на муфте сцепления микромотора

#### УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность из-за неправильно ухода за уплотнительными кольцами.

Неполадки или выход из строя из-за негерметичной.

- ▶ Не использовать вазелин или другую консистентную смазку или масло.



#### Указание

Уплотнительные кольца на муфте сцепления микромотора разрешается смазывать только ватным тампоном, смоченным средством KaVo Spray.

- ▶ Уплотнительное кольцо сжать пальцами, чтобы образовалась петля.
- ▶ Кольцо сместить вперед и снять.
- ▶ Новые уплотнительные кольца установить в канавки.

## 7 Этапы обработки согласно ISO 17664

### 7.1 Подготовка на месте применения



#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность из-за неправильной обработки изделий.**

Из-за зараженных изделий существует опасность инфицирования.

- ▶ Примите соответствующие меры по защите людей.
- ▶ Извлеките инструмент из медицинского изделия.
- ▶ Незамедлительно удалите остатки цемента, композита или крови.
- ▶ Выполняйте обработку медицинского изделия сразу после его использования.
- ▶ Медицинское изделие следует доставлять на место обработки в сухом виде.
- ▶ Не помещайте в растворы и т. п.

### 7.2 Очистка

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ!**

**Не производите обработку медицинского изделия в ультразвуковом приборе.**


Неисправности и материальный ущерб.

- ▶ Очищайте только в термодезинфекторе или вручную.

#### 7.2.1 Ручная наружная очистка

Необходимые принадлежности:

- питьевая вода  $30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $86\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{F}$ )
- Щетка, например, зубная щетка средней жесткости

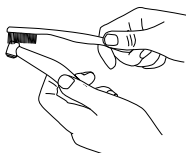

- ▶ Выполните очистку щеткой под проточной питьевой водой.

#### 7.2.2 Наружная очистка машины



KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы фирмы Miele, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

Квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® MediClean и нейтрализующего средства neodisher® Z.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Сразу после машинной очистки/дезинфекции обработайте изделие средствами и системами для ухода, предлагаемыми фирмой KaVo.

### 7.2.3 Ручная внутренняя очистка

Качественная ручная внутренняя очистка (устранение остаточного белка) возможна с применением KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray.

- ▶ Накройте медицинское изделие пакетом KaVo CLEANрас и наденьте его на соответствующий переходник для ухода. Нажмите распылитель аэрозоля 3 раза по 2 секунды. Снимите медицинское изделие с распыляющей насадки и оставьте на одну минуту, чтобы чистящее средство подействовало.
- ▶ Затем в течение 3–5 секунд промывайте средством KaVo DRYspray.

**См. также:**

- 📖 Инструкция по применению KaVo CLEANspray/KaVo DRYspray.



#### Указание

KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray для внутренней очистки вручную поставляются только в следующих странах:

Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Португалия, Франция, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия.

В других странах осуществляется только внутренняя машинная очистка с помощью термодезинфекторов согласно стандарту EN ISO 15883-1.

### 7.2.4 Внутренняя очистка машины



KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы фирмы Miele, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

Квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® MediClean и нейтрализующего средства neodisher® Z.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Чтобы избежать повреждения продукта остатками жидкости, высушите продукт внутри и снаружи. Остатки жидкости внутри и снаружи удалите сжатым воздухом.
- ▶ Непосредственно после просушки смажьте продукт средством для ухода из системы для ухода KaVo.

Как правило, сушка является составной частью программы термодезинфектора.



#### Указание

Соблюдать инструкцию по эксплуатации термодезинфектора.

### 7.3 Дезинфекция

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Неполная дезинфекция.**

Опасность инфицирования.

- ▶ Чтобы обеспечить полную дезинфекцию, тщательно продезинфицируйте изделие в неупакованном виде в стерилизаторе.



**УВЕДОМЛЕНИЕ!**

**Использование емкости для дезинфекции или хлорсодержащего дезинфицирующего средства.**

Неисправности и материальный ущерб.

- ▶ Не дезинфицировать изделие в дезинфицирующих лотках или с помощью хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

**7.3.1 Ручная наружная дезинфекция**

На основании данных по совместимости материалов KaVo рекомендует к использованию следующие продукты. Производитель дезинфицирующего средства должен гарантировать микробиологическую эффективность и подтвердить ее документально.

- Mikrozyd AF фирмы Schülke&Mayr (жидкость или салфетки)
- FD 322 фирмы Dürr
- CaviCide фирмы Metrex

Необходимые вспомогательные средства:

Салфетки для очистки изделия.

- ▶ Распылите дезинфицирующее средство на салфетку, протрите ею медицинское изделие и дайте средству подействовать согласно инструкции производителя дезинфицирующего средства.
- ▶ Соблюдать инструкцию по использованию дезинфицирующего средства.

**7.3.2 Ручная внутренняя дезинфекция**

Эффективность ручной внутренней дезинфекции должна быть документально подтверждена производителем дезинфицирующего средства. Для изделий KaVo разрешается использовать только дезинфицирующие средства, допущенные KaVo с точки зрения совместимости материалов (напр., WL-cid/фирма ALPRO).

- ▶ Сразу после проведения внутренней дезинфекции следует смазать медицинское изделие KaVo специальными средствами системы для ухода KaVo.

**7.3.3 Машинная наружная и внутренняя дезинфекция**

KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы фирмы Miele, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

Квалификационные испытания проводились с помощью программы VARIO-TD, чистящего средства neodisher® MediClean и нейтрализующего средства neodisher® Z.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Чтобы избежать повреждения продукта остатками жидкости, высушите продукт внутри и снаружи. Остатки жидкости внутри и снаружи удалите сжатым воздухом.
- ▶ Непосредственно после просушки смажьте продукт средством для ухода из системы для ухода KaVo.

Как правило, сушка является составной частью программы термодезинфектора.



### Указание

Соблюдать инструкцию по эксплуатации термодезинфектора.

## 7.4 Сушка

### Ручная сушка

- ▶ Обдуйте сжатым воздухом снаружи и продуйте изнутри, чтобы исчезли все капли воды.

### Машинная сушка

Как правило, сушка является составной частью программы термодезинфектора.

- ▶ Соблюдать инструкцию по эксплуатации термодезинфектора.

## 7.5 Средства и системы для ухода — техническое обслуживание



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Острый инструмент в изделии.**

Опасность травмирования острым инструментом.

- ▶ Выньте инструмент.

### УВЕДОМЛЕНИЕ!

**Техническое обслуживание и уход**

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Регулярно проводить требуемый уход!




### Указание

KaVo предоставляет гарантию безупречного функционирования изделий KaVo только при использовании средств ухода, указанных в списке принадлежности, т.к. именно они проверены на пригодность для наших изделий при соответствующем применении.

### 7.5.1 Уход с помощью KaVo Spray


Компания KaVo рекомендует в рамках обработки для повторного использования выполнять уход за изделием после каждого применения, т. е. после каждой очистки, дезинфекции и перед каждой стерилизацией.

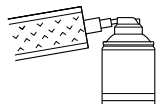

- ▶ Снимите насадку.
- ▶ Наденьте на изделие пакет Cleanpac.
- ▶ Наденьте изделие на канюлю и нажимайте в течение одной секунды на распылитель аэрозоля.

### Уход за зажимной системой


Фирма KaVo рекомендует чистить систему зажима и, соответственно, выполнять уход за ней 1 раз в неделю.

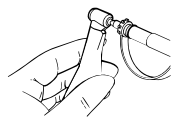

- ▶ Извлеките инструмент и, вставив наконечник распылительного ниппеля в отверстие, выполните распыление.
- ▶ Выполните уход согласно пункту «Уход с использованием аэрозоля KaVo Spray».

### 7.5.2 Уход при помощи распылителя KaVo SPRAYrotor

Компания KaVo рекомендует в рамках обработки для повторного использования выполнять уход за изделием после каждого применения, т. е. после каждой очистки, дезинфекции и перед каждой стерилизацией.

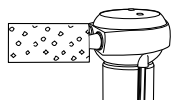

- ▶ Присоедините изделие к подходящему переходнику распылителя KaVo SPRAYrotor и наденьте на него пакет Cleanpac.
- ▶ Выполните уход за изделием.

**См. также:**

- ▣ Инструкция по эксплуатации KaVo SPRAYrotor

### 7.5.3 Уход при помощи KaVo QUATTROcare



#### Указание


QUATTROcare 2104/2104 A более не входит в комплект поставки.

Следующее изделие:

- ▶ QUATTROcare PLUS 2124 A

Прибор с давлением при расширении для внутренней очистки неорганических остатков и оптимального ухода.

(нет квалифицированной внутренней чистки согласно требованиям Института им. Роберта Коха в Германии)

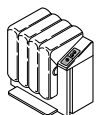

Компания KaVo рекомендует в рамках обработки для повторного использования выполнять уход за изделием после каждого применения, т. е. после каждой очистки, дезинфекции и перед каждой стерилизацией.

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент.
- ▶ Выполните уход за изделием.

**См. также:**


- ▣ Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare 2104/2104A

### Уход за цанговым зажимом

Фирма KaVo рекомендует чистить систему зажима и, соответственно, выполнять уход за ней 1 раз в неделю.

**См. также:**

- ▣ Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare 2104/2104A

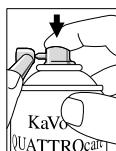

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент и, вставив наконечник распылительного ниппеля в отверстие, выполните распыление.

- ▶ Затем обработайте изделие с использованием указанных средств и систем для ухода.

**См. также:**


- 📖 Уход при помощи KaVo QUATTROcare

**7.5.4 Уход с помощью KaVo QUATTROcare PLUS**

Прибор с давлением при расширении для внутренней очистки неорганических остатков и оптимального ухода.

(нет квалифицированной внутренней чистки согласно требованиям Института им. Роберта Коха в Германии)

Компания KaVo рекомендует в рамках обработки для повторного использования выполнять уход за изделием после каждого применения, т. е. после каждой очистки, дезинфекции и перед каждой стерилизацией.

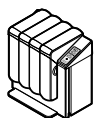

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент.
- ▶ Выполните уход за изделием с помощью QUATTROcare PLUS.

**См. также:**

- 📖 Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare PLUS

**Уход за цанговым зажимом**

Фирма KaVo рекомендует чистить систему зажима и выполнять уход за ней один раз в неделю при помощи встроенной в прибор программы ухода за цанговым зажимом.

**См. также:**

- 📖 Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare PLUS

**Указание**

Перед началом ухода за цанговым зажимом поместите ручные инструменты в удаленное от муфт ухода место.


- ▶ Закройте переднюю крышку, затем нажмите и удерживайте кнопку режима ухода за цанговым зажимом не менее трех секунд, пока светодиод контроля аэрозольного баллона не мигнет три раза подряд.

⇒ Устройство переключится в режим ухода за цанговым зажимом.

- ▶ Извлеките муфту ухода для цангового зажима из боковой дверцы QUATTROcare PLUS и насадите ее на муфту, место четыре (крайнее справа). На ней должен быть установлен адаптер MULTIflex.

- ▶ Направляющей втулкой цангового зажима, за которым нужно выполнить уход, прижмите инструмент к острому концу муфты ухода для цангового зажима.

- ▶ Нажмите клавишу с символом режима ухода за цанговым зажимом.

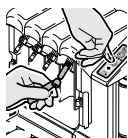

**Указание**

**Завершите работу в режиме ухода за цанговым зажимом.**

Вариант 1: укомплектуйте QUATTROcare PLUS 2124 A инструментами, закройте переднюю крышку и начните процедуру ухода.

Вариант 2: если операция ухода не выполняется, прибор автоматически переключается в обычный режим ухода через три минуты.

**См. также:**

- 📖 Уход при помощи KaVo QUATTROcare PLUS

## 7.6 Упаковка

**Указание**

Стерилизационный пакет должен быть достаточно большим для насадки, чтобы упаковка не находилась под механическим натяжением.

Стерилизационная упаковка должна удовлетворять существующим нормам относительно качества и применения и быть пригодной для процедуры стерилизации!

- ▶ Заверните каждое медицинское изделие в отдельную стерильную упаковку!

## 7.7 Стерилизация

### Стерилизация в паровом стерилизаторе (автоклаве) согласно EN 13060/ISO 17665-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ!****Техническое обслуживание и уход**

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Перед каждым циклом стерилизации выполнять уход за медицинским изделием при помощи средств для ухода KaVo.

**УВЕДОМЛЕНИЕ!****Контактная коррозия из-за влаги.**

Повреждения изделия.

- ▶ После завершения цикла стерилизации немедленно выньте изделие из стерилизатора!



Медицинское изделие KaVo имеет термостойкость до макс. 138 °C (280,4 °F).

Вы можете выбрать подходящую процедуру стерилизации из представленных ниже (в зависимости от имеющегося в наличии автоклава):

- Автоклав с системой трехэтапного форвакуума:
  - не менее 3 мин. при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
- Автоклав с гравитационной системой:
  - не менее 10 мин. при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
- ▶ Применять согласно инструкции по эксплуатации.

## 7.8 Хранение

Подготовленные продукты должны храниться защищенными от пыли в сухом, темном и прохладном помещении, по возможности, бедном микроорганизмами.



### **Указание**

Соблюдать срок годности стерильного материала.

## 8 Вспомогательные средства

Поставляются через специализированную торговую сеть.

Сокращенное наименование материала	Материал №
Подставка для инструмента 2151	0.411.9501
Пакеты Cleanpac 10 штук	0.411.9691
Прокладки из целлюлозного волокна 100 штук	0.411.9862
Распылительная головка INTRA (KaVo Spray)	0.411.9911
Муфта ухода INTRA	1.009.6143

Сокращенное наименование материала	Материал №
Адаптер INTRAmatic (CLEANspray и DRYspray)	1.007.1776
KaVo CLEANspray 2110 P	1.007.0579
KaVo DRYspray 2117 P	1.007.0580
KaVo Spray 2112 A	0.411.9640
Аэрозоль ROTAspray 2 2142 A	0.411.7520
QUATTROcare plus Spray 2140 P	1.005.4525

## 9 Гарантийные обязательства

Для данного медицинского изделия KaVo действуют следующие гарантийные условия:

Компания KaVo гарантирует конечному пользователю безупречное функционирование, отсутствие дефектов материалов или их обработки в течение 12 месяцев со дня выставления счета при соблюдении следующих условий:

При подаче обоснованной рекламации компания KaVo обеспечивает бесплатный ремонт или замену. Иные претензии любого рода, в частности, по возмещению убытков, не рассматриваются. В случае задержек в поставках, грубой небрежности или злонамеренного умысла данное положение действительно лишь в том объеме, в котором оно не противоречит предписаниям действующего законодательства, подлежащим обязательному соблюдению.

Фирма KaVo не несет ответственности за дефекты и их последствия, возникшие или могущие возникнуть в результате естественного износа, ненадлежащего обращения, ненадлежащей очистки, ухода или обслуживания, несоблюдения указаний по эксплуатации или подключению, обызвествления или коррозии, загрязнения подаваемого воздуха или воды, а также химических или электрических воздействий, являющихся необычными или недопустимыми согласно руководствам по применению и другим руководствам фирмы KaVo. Гарантия не распространяется на лампы, световоды из стекла или стекловолокна, изделия из стекла и резины, а также на стойкость цвета деталей из пластмасс.

Любая ответственность исключена, если дефекты или их последствия являются результатом модификации изделия клиентом или третьими лицами без соответствующих полномочий от компании KaVo.

Гарантийное обслуживание возможно только при предоставлении документа, подтверждающего его покупку: копии счета или накладной. В документах должны быть четко указаны торговая организация, дата продажи, тип и серийный номер изделия.



**Представительство в России :**

ООО «КаВо Дентал Руссланд»,  
195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,  
д. 64, литера В, помещение 26Н.  
Тел.: +7 (812) 324-42-12, факс: +7 (812) 324-20-53;  
Рекламации направлять по адресу:  
E-mail: [kavo@kavodental.ru](mailto:kavo@kavodental.ru)  
[www.kavodental.ru](http://www.kavodental.ru)

**Сервисная служба KaVo в Санкт-Петербурге :**

Тел.: +7 (812) 324-13-61, факс: +7 (812) 324-20-80;  
E-mail: [Service.russia@kavo.com](mailto:Service.russia@kavo.com)